

Bruksanvisning antigen hurtigttest for fullvaksinerte ansatte

Testen tas fortrinnsvis hjemme, evt. på egnet sted alene.

Kun antigen hurtigttester godkjent/utlevert av HNT kan brukes til dette formålet.

Kun brukes av fullvaksinerte ansatte med vage/lette, nyoppståtte luftveissymptomer, eller restsymptomer og feberfri i minst 24 timer. Den ansatte selv, evt. i samråd med nærmeste leder, avgjør om antigen hurtigttest skal brukes.

Negativ antigen hurtigttest: må du avklare retur til jobb med din nærmeste leder. Bruk munnbind ved opphold < 1 m fra alle andre, så lenge du har vage symptomer. Skap så få definerte nærkontakter som mulig i løpet av arbeidsdagen.

Dersom symptomene forverrer seg: Dra hjem og bestill en PCR-test.

Dersom positiv antigen hurtigttest: Ikke gå på jobb/dra hjem. Ta en PCR-test for å bekrefte testresultatet fra antigen testen

Antigen-hurtigttest skal ikke brukes i sammenhenger der du er definert som nærkontakt eller husstandsmedlem til smittet.

Hurtigguide til testing:

1. Utfør håndhygiene.
2. Blås i nesene en gang i et papirlommetørkle.
3. Ta ut testpinnen, ikke berør vattdelen.
4. Bøy hodet lett bakover. Ta pinnen ca. 2 cm inn i nesene og roter mot neseveggen ca. 15 sek./ 4 ganger rundt. Dette gjøres i begge nesebor.
5. Ta folien av prøverøret med væske i. Stikk vattdelen av prøvepinnen ned i væsken og rør vattpinnen i væsken minimum 10 ganger, slik at prøvematerialet kommer ned i væsken.
6. Trekk vattpinnen ut, mens du klemmer på siden av testrøret, for å få mest mulig væske ut av vattpinnen. NB! Viktig for å få et riktig resultat.
7. Sett på pipettekorken på testrøret.
8. Legg testbrikken på flatt underlag. Testbrikken må stå helt i ro under testen
9. Drypp **4 dråper i den RUNDE brønnen** (ikke over det firkantede resultatvinduet). Utfør håndhygiene
10. Vent i minimum 15 minutter og maksimum 30 minutter med å lese av testresultatet.
11. Utfør håndhygiene etter at du har lest av testen og kastet den

